

BRUCELLOSI: SCHEDA INVIO CAMPIONI PER ESAME COLTURALE

MOD.N.	40IZ215	EDIZ./REV.	01/00	LABORATORIO:
PGS N°	20IZ002	PAGINA 1 DI 1		DATA: 13/10/2010

ALLEVAMENTO:

Indirizzo:

CODICE REGIONALE ALLEVAMENTO:USSL:ISTAT: Progr: AZ:

(* BOVINO (BV) - N° CONTRASSEGNO:

(* OVINO (OV) - N° CONTRASSEGNO:

(* CAPRINO (CP) - N° CONTRASSEGNO:

RAZZA:..... SESSO:..... ETA:

TIPOLOGIA DI PRELIEVO PER CATEGORIA:

BV: VACCHE
OV/CP: FEMMINE

BV: MANZE

BV: MASCHI
OV/CP:MASCHI

MILZA
Linfonodi ILIACI (dx e sin)
4/4 MAMMARI
Linf. SOPRAMAMMARI (dx e sin)
UTERO

MILZA
Linfonodi ILIACI (dx e sin)
Linfonodi TESTA (sottomandibolari-parotidei-retrofaringei)

MILZA
Linfonodi ILIACI (dx e sin)
APP. RIPRODUTTORE (testicolo, prostata, epididimo, v esc. seminali)
E LINF. ASSOCIATI

- (*) **utilizzare una scheda per ogni capo**
- i campioni devono essere **stoccati e identificati separatamente** in contenitori ermetici (sacchetto/barattolo) e riposti insieme in un secondo unico contenitore ermetico (sacchetto) (NB: i linfonodi dx e sin dello stesso tipo possono essere inviati nel medesimo contenitore)
- l'invio dei campioni al laboratorio va effettuato a temperatura di refrigerazione entro 12 ore dal prelievo (se non è possibile → congelare il materiale per invio in tempi successivi)
- dei 4/4 mammari **di bovino** va inviato un quantitativo di tessuto corrispondente a ca. 10x10x10 cm **per quarto**; per gli ovi-caprini inviare la mammella intera

MACELLO: indirizzo:.....

ASR:.....

Cognome e Nome del Veterinario

Data

Firma

.....

.../.../.....

.....